



Share2Go

# Instructiekaart scootmobiel Life & Mobility Solo 3



Op deze instructiekaart vindt u de uitleg voor een aantal handelingen die u zelf uit kunt voeren. De onderstaande afbeelding helpt u met het vinden van de positie van verschillende hendels en andere onderdelen van de scootmobiel. De letter bij de hendel komt overeen met de letter van de stap waarbij het onderdeel hoort.



## A. Draaien van de stoel voor gemakkelijke instap

1. Zet de armleuning rechtop
2. Beweeg de hendel aan de rechterzijde van de stoel omlaag
3. Draai de stoel opzij
4. Neem plaats op de stoel en draai de stoel op dezelfde manier weer recht

## B. Het aanpassen van de zithoogte

1. Neem plaats op de scootmobiel.
2. Beweeg de hendel aan de rechterzijde van de stoel omhoog.
3. Als u op de stoel zit zal deze naar beneden zakken.
4. Beweeg de hendel omhoog zonder dat u op de scootmobiel zit om de stoel omhoog te laten gaan.

## C. Het aanpassen van de zitdiepte (hoe ver u van het stuur af zit)

1. Om de zitdiepte te veranderen beweegt u de hendel aan de linkerzijde van de stoel.
2. Schuif de stoel naar voren of naar achteren.
3. Laat de hendel los. De stoel staat nu weer vast.

## D. Het aanpassen van de hoek van de rugleuning

1. Beweeg de hendel aan de rechterzijde van de stoel op de hoek waar de rugleuning en de zitting samenkomen omhoog.
2. Wanneer u meer naar achteren wilt leunen duwt u voorzichtig tegen de rugleuning. Wanneer u meer rechtop wil zitten leunt u helemaal niet tegen de rugleuning.
3. Laat de hendel los als de leuning in de juiste positie staat.

## E. Het aanpassen van de hoek van de arMLEuning

1. Zet de arMLEuning omhoog zodat u de draaiknop beter kan bedienen.
2. Draai aan de draaiknop die aan de onderzijde van de arMLEuning zit.
3. Zet de arMLEuning weer terug omlaag om te kijken of de arMLEuning in de goede positie staat.

## F. Het aanpassen van de lumbaalsteun in de rugleuning (extra steun in de onderrug)

1. Knijp in het ballonnetje aan de linkerzijde van de stoel om de steun wat toe te laten nemen.
2. Wilt u minder steun? Draai aan de knop voor het ballonnetje om de steun af te laten nemen.

## G. Het aanpassen van de hoek van de stuurkolom

1. Trek aan de hendel aan de bestuurderszijde van de stuurkolom.
2. Beweeg de stuurkolom naar u toe of van u af. Heeft u de gewenste positie gevonden? Laat de hendel weer los.

## H. Opladen van de accu van de scootmobiel

Aan de linkerzijde van de stuurkolom zit het acculaadcontact. Steek de ene kant van de lader in het acculaadcontact en de andere kant van de lader in het stopcontact. Het duurt 8 tot 14 uur om de scootmobiel volledig op te laden. Sluit bij terugkomst na een rit altijd de oplader aan.

## I. Vrijloopmechanisme

1. Aan de linkerzijde van de scootmobiel dichtbij het linkerachterwiel zit een hendel, zet deze hendel om. Vergeet deze niet na gebruik weer terug te zetten, anders werkt de scootmobiel niet.
2. Gebruik deze functie alleen voor het duwen van een persoon op een scootmobiel bij pech of storing, het manoeuvreren van de scootmobiel in krappe ruimtes of het verplaatsen van de scootmobiel wanneer de accu leeg is.
3. **Let op:** zorg ervoor dat de scootmobiel nóóit op een helling of drempel staat wanneer u de vrijloophendel omzet. Deze kan dan door de zwaartekracht gaan rollen.

## Oplossen van problemen

Reageert de scootmobiel helemaal nergens op?

Dan kunt u het volgende proberen:

- Controleer of de sleutel in het contactslot zit en de scootmobiel aan staat.
- Controleer of de accu's zijn opgeladen.
- Controleer of de scootmobiel niet in de vrijloopstand staat.

## Werken bovenstaande oplossingen niet?

Wanneer bovenstaande oplossingen niet werken of wanneer er een foutmelding op het scherm van de scootmobiel staat kunt u bellen met Share2Go: **085 487 5668**. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.



**Heeft u een vraag?**

**Bel 085 - 487 5668 of kijk op [www.share2go.nl](http://www.share2go.nl)**